




1 Öffnen

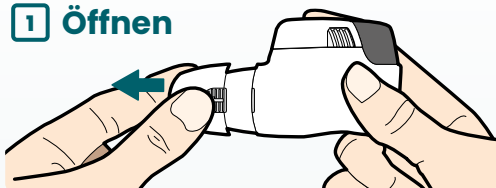

2 Auslösen

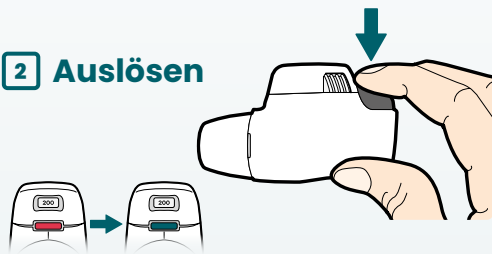

3 Inhalieren

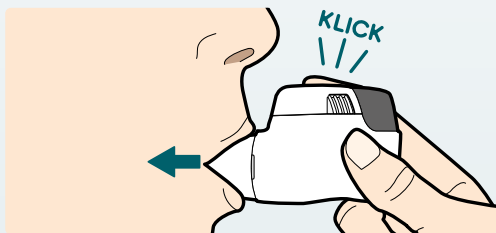

Es wird empfohlen die Inhalation vor den Mahlzeiten vorzunehmen oder den Mund nach jeder Inhalation mit Wasser auszuspülen bzw. die Zähne zu putzen, um das Risiko für einen Pilzbefall im Mund- und Rachenraum zu reduzieren.

Novolizer®-Bedienungsanleitung*

zur einfachen 3-Schritt-Inhalation

- 1 Schutzkappe** vom Mundstück **entfernen**, dafür seitlich leicht zusammendrücken und nach vorne abziehen. Bei **Erstgebrauch** bitte **vorher** eine **Patrone** wie auf der Rückseite beschrieben **einsetzen**.
- 2 Dosiertaste** einmal kräftig nach unten **drücken**, sodass die Farbe des Kontrollfensters von Rot nach Grün wechselt. Dosiertaste dann loslassen. Der Novolizer® ist nun bereit zur Inhalation.
- 3** Sich hinstellen oder aufsetzen. **Tief ausatmen**, jedoch keinesfalls in den Inhalator. Anschließend Mundstück luftdicht mit den Lippen umschließen und mit einem **kräftigen Atemzug einatmen**. Dabei sollte ein deutliches Klicken hörbar sein, welches eine korrekte Inhalation anzeigt. Das Kontrollfenster sollte dabei von Grün auf Rot wechseln.

Mundstück aus dem Mund nehmen und den **Atem für etwa 5-10 Sekunden anhalten**. Langsam und gleichmäßig **ausatmen**, jedoch keinesfalls in den Inhalator. Schutzkappe wieder aufsetzen.


+ 3fach-Kontrolle

Hören + Schmecken + Sehen

Bei korrekter Inhalation ist ein deutliches „**Klick**“ zu hören, die freigesetzten Milchzuckerteilchen schmecken **süß** und das Kontrollfenster zeigt wieder die Farbe **Rot**. Falls die Kontrollzeichen nicht zutreffen, sollte die Inhalation wiederholt werden.


* Ihr Arzt hat Ihnen das Inhalationsgerät Novolizer® verordnet. Verwenden Sie den Novolizer® immer genau so, wie hier beschrieben. Diese Bedienungsanleitung ersetzt keine Beratung. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die ausführliche Gebrauchsinformation oder wenden sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Patrone einsetzen/wechseln

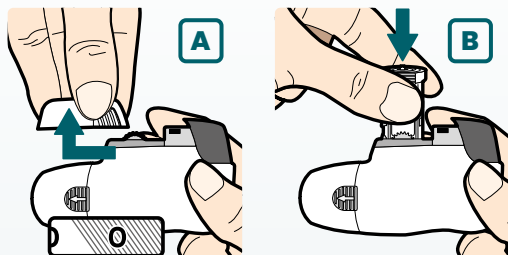

Vor **Erstnutzung** und immer, wenn vorne im Zahlenfenster eine **schrattierte Null** erscheint, muss eine neue Patrone eingesetzt werden: **A Deckel abnehmen**, dafür an den geriffelten Flächen leicht zusammendrücken, nach vorn und oben ziehen. **B Neue Patrone** aus der Schutzdose nehmen. Dabei darauf achten, dass die Farbcodierung der Patrone der Farbe der Dosiertaste entspricht. Anschließend wird die Patrone so eingesetzt, dass das Zahlenfenster zum Mundstück zeigt. **Achtung!** Achten Sie beim Einsetzen der Patrone darauf, nicht die Dosiertaste zu drücken. Deckel anschließend wieder aufsetzen.

Inhalator reinigen

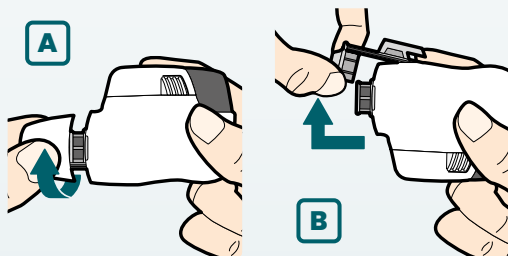

Mundstück, Dosierschlitten und Gehäuse regelmäßig trocken reinigen – **nie mit Wasser oder Reinigungsmittel!** **A Mundstück entfernen** (Schutzkappe abnehmen und Mundstück gegen den Uhrzeigersinn drehen) und **B Dosierschlitten entnehmen** (Novolizer® auf den Kopf drehen und Dosierschlitten nach vorn und oben abziehen). Pulverreste durch **leichtes Ausklopfen** entfernen (auch bei einer versehentlichen Auslösung das Pulver verworfen und nicht inhalieren) und für die Reinigung ein **weiches, fusselfreies Tuch** verwenden. Novolizer® anschließend wieder zusammensetzen. Dafür den Dosierschlitten schräg von oben einsetzen und in Position drücken. Anschließend das Mundstück durch eine drehende Bewegung nach rechts wieder aufsetzen.

Novolizer®
Der Pulverinhalator

Viatrix Healthcare GmbH,
Lütticher Str. 5, 53842 Troisdorf. © 2024

